

Οδηγίες για τη σωστή μεταφορά των στελεχών για έλεγχο μικροβιακής αντοχής

Παρακαλούμε, για τη σωστή μεταφορά των στελεχών μικροοργανισμών για έλεγχο μικροβιακής αντοχής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

Λειτουργία του εργαστηρίου και προκειμένου τα δείγματα να γίνονται αποδεκτά από το εργαστήριο,:

- Να αποστέλλονται σε στυλεό μεταφοράς τοποθετημένοι σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς (stuart, amies, κλπ)
- Η λήψη να γίνεται από μεμονωμένη αποικία του μικροοργανισμού που πρέπει να είναι πλήρως ταυτοποιημένος σε επίπεδο είδους.
 - Να αναφέρεται η μέθοδος ταυτοποίησης και ο σχετικός αριθμός ταυτοποίησης (API, VITEK, MALDI-ToF).
- Το δείγμα να συνοδεύεται από τα κατάλληλα παραπεμπτικά E-09-30 και E-09-50 (για εντεροβακτηριακά και *Campylobacter* spp αντιστοίχως).